

Audiospot

Boucle d'induction magnétique

Accueil des personnes malentendantes



Caractéristiques techniques	
Dimensions	170x180mm ; 540g
Installation	bloc secteur 100-240VAC 50Hz / sortie 15VDC
Couverture	Rayon +/- 1m
Sensibilité microphone	-60 ± 3dB
T°C fonctionnement	0°C à +40°C


Activation : enclencher de la *fonction T* de l'appareil auditif de la personne souffrant de handicap. La boucle magnétique émet en permanence.

Fonctionnement : parler dans le micro branché sur la boucle magnétique. Le volume de la voix est amplifié uniquement dans l'appareil auditif du visiteur.

Installation et démarrage : brancher sur secteur, pictogramme côté visiteur, installer sur la banque de réception. Pour démarrer / éteindre l'appareil, appuyer sur la **touche ON (vert)** ou **OFF (rouge)**.

Signal :

- vert : en état de fonctionnement normal,
- clignotement en orange : le produit détecte une voix, un son.

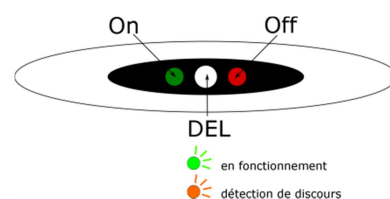

Vue de dessus